



Használati utasítás:

1. Kézmosás után tisztítsa meg a heg vonalát és a környező bőrt, majd törölje szárazra.
2. A kötszer kibontása után távolítsa el a védőréteget, formázza a kívánt méretre, majd helyezze a kezelendő területre.
3. A CICA-CARE öntapadós, a kötszer nyújtása nélkül eredeti állapotában helyezze a sebre. Szükség szerint kötésrögzítő alkalmazható.
4. Erős rögzítést ne alkalmazzon, mert a nyomás irritációt okozhat a hegen és a környező szövetekben.
5. A fennmaradó lapot helyezze biztonságosan vissza csomagolásába, majd fénytől, hőtől védett száraz helyen tárolja.
6. A géllapot naponta kétszer enyhén szappanos vízzel tisztítsa meg. Nagy melegben vagy erőteljesebb fizikai aktivitás esetén ennél gyakoribb tisztításra is szükség lehet. Mellőzzük az erős hatású tisztító-szereket. Saját jó közérzetünk és kényelmünk érdekében a CICA-CARE egyszerűen levehető a napi higiéniai tisztálkodás során.
7. Tisztítás után a CICA-CARE géllapot töröljük szárazra az új felhelyezés előtt. A kezelendő bőrfelület tisztítása és szárazra törlése is szükséges.

A CICA-CARE előnyei :

- Baktériumok számára átjárhatatlan
- Biztonságos
- Hatékony
- Egyszerű használat
- Kényelmes
- Tartós
- Hatása klinikailag bizonyított
- Alakítható
- Hypoallergén
- Vízgőzáteresztő

 **smith&nephew**
CICA-CARE®
Adhesive Silicone Gel Sheets

További kérdések esetén kérjük hívja az alábbi telefonszámot: **06-30-720-6639**



CICA-CARE SZILIKON GÉLLAP Egyedülálló hegkezelő termék

A CICA-CARE klinikailag bizonyított heg deformitást megelőző és kezelő hatású szilikon géllap. Orvosilag bizonyítottan az esetek mintegy 90%-ában hatékonyan halványítja és puhítja a vörös, kiemelkedő hegeket, akár régiek, akár új keletűek. Biztonságosan alkalmazható gyermekek és felnőttek esetén egyaránt.



 **smith&nephew**
CICA-CARE®
Adhesive Silicone Gel Sheets

Ausztráliában 1982-ben egy gyermek-kórház olyan anyagot keresett, amelyet nyomókötés alatt használhatnak a nyomás egyenletes elosztására. Azt tapasztalták, hogy ahol szilikongélt alkalmaztak, a heg sokkal gyorsabban gyógyult. A felfedezést az Egyesült Királyságban klinikai vizsgálatok követték, amelyek arra az eredményre vezettek, hogy a szilikongél önmagában használva is hatékony.

Indikációk:

Hipertrófiás és keloidos hegek kezelésére. A hegképződés megelőzése érdekében a **CICA-CARE** bármilyen régi vagy új, összezárt seben alkalmazható, ezek között a vörös vagy kiemelkedő műtéti hegeken is, pl. császármetszés, plasztikai sebészeti metszések, baleseti sérülések, égések, vágások okozta hegeken. A CICA-CARE géllap használata előtt mindig győződjünk meg róla, hogy a seb már összezárodott. Nyílt, fertőzött, varas sebre, illetve varratra ne használjuk!



Alkalmazás:


A kontaktgéllal kezelt felületről vegye le a tiszta filmréteget, és ragassza a kezelendő felületre. A gél mindkét oldala a könnyebb kezelést, alakítást és tárolást segítő réteggel van ellátva, további rögzítés nem szükséges.

Kezelési időszakok:


A kezelés első két napján a napi 4 óra használat javallott. A harmadik naptól kezdve a kezelés időtartama fokozatosan 2 órával növelhető, javasolt a minimum 12 órás használat naponta. Amennyiben lehetséges a 24 órás alkalmazás elérése a legideálisabb. A fokozatos bevezetés azért szükséges, mert kizárja az irritációt és az allergiás folyamatokat.

A hegek javulása sebként és egyéenként változó, egyesek sebe már napokon belül észlelhető javulást mutat. Klinikai tapasztalatok azt mutatják a legjobb eredmények a 2-4 hónapig tartó kezeléssel érhetőek el!

A heg javulása 2 hónapos kezelést követően

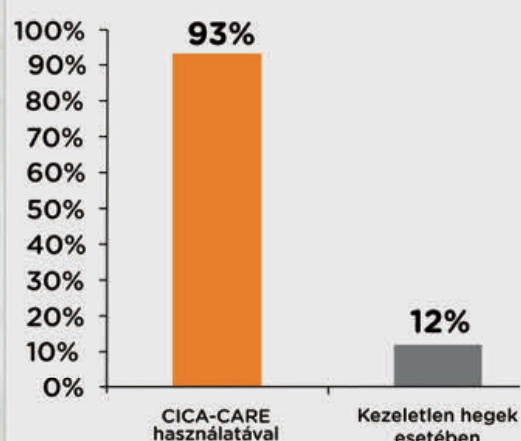

2 hét után a heg gyógyulási aránya a különböző szilikongélt használók körében

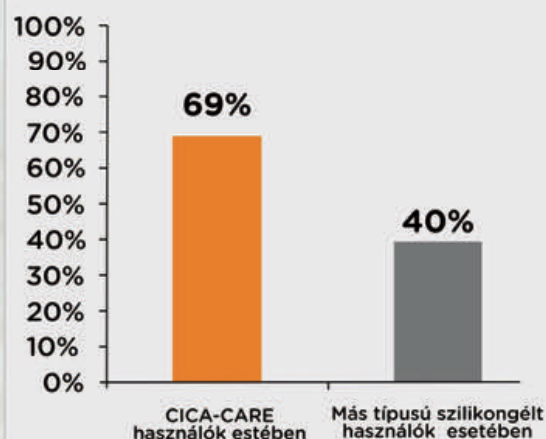

A **CICA-CARE** fejlett technológiai kialakításának köszönhetően tovább használható, ezáltal költséghatékony.